

Upute

Pravilna uporaba

EASYSpray

regulatora tlaka



EASYSpray regulator tlaka

Rad EASYSpray regulatora tlaka (kirurški zahvat na otvorenoj rani)



- 1 Umetnite bateriju od 9V u EASYSpray regulator tlaka.



- 4 Spojite filtre kompleta raspršivača na EASYSpray uređaj. Spojite plavi filter (vod za tlak) na plavi ženski luer priključak, a prozirni filter (vod senzora) na muški luer priključak.



- 2 Spojite EASYSpray uređaj na iv nosač ili na naslon bolničkog kreveta pomoću stezaljki na stražnjoj strani uređaja.



- 5 Okrenite glavni prekidač na prednjoj strani EASYSpray uređaja u uključeni položaj (I).



- 3 Upotrijebite odgovarajuću spojnu cijev za spajanje EASYSpray uređaja na medicinski zrak (u rasponu od 3,5 – 7 bara / 50 – 100 psi).



- 6 Provjerite manometar na EASYSpray uređaju radi odgovarajućeg raspona tlaka od 1,5-2,0 bara (21,5-28,5 psi). Namjestite postavke tlaka okretanjem prekidača za kontrolu tlaka.

MJERE OPREZA

Svaka primjena komprimiranog plina može predstavljati potencijalnu opasnost za nastanak zračne ili plinske embolije, rupturu tkiva ili zadržavanje komprimiranog zraka ili plina, što može predstavljati prijetnju po život bolesnika ako se proizvod neispravno raspršuje.

Mjere opreza

Za fibrinsko tkivno ljepilo TISSEEL LYO

- Za kirurški zahvat na otvorenoj rani: prilikom primjene fibrinskih otopina za tkivno ljepilo u spreju pomoću raspršivača pod tlakom maksimalni tlak smije biti 2,0 bara (28,5 psi). Proizvod je potrebno raspršivati na udaljenosti od najmanje 10 cm od površine tkiva.
- Sprej primjenjujte samo ako je moguće točno procijeniti udaljenost raspršivača u skladu s preporukom proizvođača. Sprej nemojte nanositi na udaljenosti bližoj od preporučene.
- Prije primjene fibrinskih otopina za tkivno ljepilo u obliku spreja, područje na površini rane mora se osušiti isključivo primjenom standardnih tehnika (npr. povremena primjena kompresa, vata, upotreba naprava za usisavanje).
- Potrebno je pomno pratiti promjene krvnog tlaka, brzine otkucaja srca, zasićenosti kisikom i parcijalnog tlaka CO₂ u izdahnutom zraku kada sprejem raspršujete fibrinske otopine za tkivna ljepila pomoću raspršivača pod tlakom zbog mogućnosti zračne ili plinske embolije.
- Regulator treba upotrebljavati u skladu s preporukama proizvođača te Sažetkom opisa svojstava lijeka i Uputama za uporabu.



TISSEEL
[Fibrin Sealant]

Fibrinsko tkivno ljepilo	Kirurški zahvat	Komplet raspršivača za primjenu	Aplikatorski vrhovi za primjenu	
TISSEEL LYO	Otvorena rana	Komplet raspršivača DUPLOJECT	nije primjenjivo	E
		Komplet raspršivača TISSEEL LYO	nije primjenjivo	E

OPREZ: Svaka primjena komprimiranog plina može predstavljati potencijalnu opasnost za nastanak zračne ili prijetnju po život bolesnika. Obavezno poduzmite sve potrebne mjere za izbjegavanje tih opasnosti tako da se u uputama za uporabu odgovarajućeg kompleta raspršivača i u tablici gore.

Sve nuspojave kao i sumnju na neispravnost u kakvoći lijeka potrebno je prijaviti Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem:

- obrasca dostupnog na internetskoj stranici www.halmed.hr. Prijave je moguće poslati poštom (Ksaverska cesta 4, 10 000 Zagreb), telefaksom (01/4884-110) ili elektronskom poštom u Word formatu (nuspojave@halmed.hr).

ili

- on-line prijave nuspojava dostupne na internetskoj stranici www.halmed.hr.

Za detaljne informacije obratite se svom lokalnom predstavniku.

Prije primjene Tisseel Lyo molimo proučite zadnji odobreni

Sažetak opisa svojstava lijeka dobiven od stručnog suradnika.

Preporučeni tlak i udaljenost

Regulator tlaka za primjenu	Preporučena udaljenost od ciljanog tkiva	Preporučeni tlak u regulatoru tlaka/brzina protoka
EASYSPRAY	10 - 15 cm	1,5 - 2,0 bar (21,5 - 28,5 psi)
EASYSPRAY	10 - 15 cm	1,5 - 2,0 bar (21,5 - 28,5 psi)

plinske embolije, rupture tkiva ili zadržavanje komprimiranog zraka ili plina, što može predstavljati pridržavate preporučene minimalne udaljenosti raspršivanja i maksimalnog tlaka, što je sve navedeno



A series of 20 horizontal blue lines, evenly spaced, providing a writing area for text.





TISSEEL
[Fibrin Sealant]

Baxter

Baxter Healthcare S.A.
Poštanski pretinac
CH-8010 Zürich

Verzija 2, 12. 3. 2015.



Zastupnik i distributer tvrtke Baxter za RH
Jakuševička cesta 4b, 10 000 Zagreb
☎ +385 1 6610 333 📠 +385 1 6610 300
e-mail: agmar@agmar.org
www.agmar.org

Baxter, Tisseel, Tissomat i Easyspray zaštitni su znaci
tvrtke Baxter International Inc., njezinih podružnica ili partnera
SAMO ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE.

Siječanj 2015 EUMP/90/15-0001