

Siemens Healthcare GmbH, SHS DI MR QT, Allee am Roethelheimpark 2,
91052 Erlangen

MAGNETOM Family

Informacije o zaštiti sluha

Ime i prezime Jörg Teiche
Odjel SHS DI MR QT

Telefon +49 (9131) 84-2258

Naša referenca MR031/20/P
Datum 19. svibnja 2021.

Obavijest za korisnike


Informacije o zaštiti sluha

Poštovani korisnici sustava tvrtke Siemens,

ovim bismo vas dopisom željeli obavijestiti o zaštiti sluha tijekom MR pregleda potaknuti opažanjima dobivenima iz posttržišnog nadzora putem našeg sustava za posttržišni nadzor. U sklopu kliničkog posttržišnog nadzora savjetujemo vam da se pridržavate sljedećih mjera tijekom MR pregleda kako bi se izbjegle moguće nezgode / štetni događaji.

Razvoj buke

Uključivanjem struja u gradijentnim zavojnicama u svrhu snimanja, tijekom MR pregleda mehaničke sile uzrokuju razvoj buke (zvukovi zujanja i kuckanja) koji mogu premašivati 99 dB(A) u otvoru.

 **UPOZORENJE**

Razvoj buke tijekom pregleda MR-om!

Ozljeda pacijenta i osoba u prostoriji za pregled (oštećenje sluha sve do trajnog gubitka sluha)

- ◆ Pacijentu osigurajte odgovarajuću opremu za zaštitu sluha koja smanjuje buku na najmanje 99 dB(A).
- ◆ Obvezno zaštitite uši pacijentima pod anestezijom i pacijentima bez svijesti. Za te pacijente ne smije se izostaviti zaštita ušiju čak ni pri umjerenim razinama zvuka.
- ◆ Pobrinite se da osoblje i prateće osobe u prostoriji za pregled tijekom pregleda koriste zaštitu sluha koja smanjuje buku na najmanje 85 dB(A).

Siemens Healthcare GmbH
Uprava: Bernhard Montag, predsjednik i glavni izvršni direktor;
Darleen Caron, Jochen Schmitz, Christoph Zindel

Allee am Roethelheimpark 2
91052 Erlangen
Njemačka


Telefon: +49 (9131) 84 0
siemens.com/healthcare

Predsjednik nadzornog odbora: Ralf P. Thomas
Sjedište društva: München, Njemačka; trgovački registar: München, HRB 213821
WEEE-reg.-br. DE 64872105

Odgovarajuće razine prigušenja mogu se ostvariti, primjerice, čepićima za uši. Čepići za uši koji pružaju odgovarajuću zaštitu sluha mogu se pronaći u katalogu pribora tvrtke Siemens.

Standardne slušalice tvrtke Siemens namijenjene su za komunikaciju s pacijentom i mogu se upotrebljavati u kombinaciji s čepićima za uši.

- Za odgovarajuću razinu prigušenja zvuka važna je ispravna primjena zaštite sluha. Sve osoblje mora biti obučeno za ispravnu primjenu zaštite sluha.
- Posebna pažnja i obuka korisnika potrebne su za ispravno pozicioniranje zaštite sluha za novorođenčad i dojenčad. Osim toga, to se primjenjuje na svaki drugi uvjet gdje je možda potreban alternativni oblik zaštite sluha.
- Za MR preglede dojenčadi možda je potrebna posebna zaštita sluha.
- Zbog povećane tjeskobe, dopuštena razina zvučnog tlaka može biti razlog zabrinutosti za trudnice i njihovo nerođeno dijete, novorođenčad, dojenčad, malu djecu i starije osobe.

 UPOZORENJE
<p>Razvoj buke tijekom pregleda MR-om!</p> <p>Ozljeda pacijenta (oštećenje sluha sve do trajnog gubitka sluha)</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Pacijentu osigurajte odgovarajuću opremu za zaštitu sluha koja smanjuje buku na najmanje 99 dB(A). Primjerice, primijenite Ohropax® classic (voštani čepići) na pacijenta.

Zahvaćeni su sljedeći sustavi syngo MR VA:

- MAGNETOM Symphony
- MAGNETOM Sonata
- MAGNETOM Symphony / Sonata Vision
- MAGNETOM Trio
- MAGNETOM C!
- MAGNETOM Harmony
- MAGNETOM Harmony Expert
- MAGNETOM Concerto
- MAGNETOM Symphony-P
- MAGNETOM Allegra
- MAGNETOM Novus 1.5

Potvrdite primitak ove obavijesti

Potpišite priloženi dokument „Potvrda o primitku” i predajte ga servisnom inženjeru tvrtke Siemens.

Ispričavamo se zbog izazvanih neugodnosti.

S poštovanjem,

Siemens Healthcare GmbH



Teiche Joerg

– Jörg Teiche
Potpredsjednik Odjela za kvalitetu
Magnetic Resonance
Siemens Healthcare GmbH



Kampmeier Juergen

Dr. Jürgen Kampmeier
Potpredsjednik Odjela za istraživanje i razvoj
Magnetic Resonance
Siemens Healthcare GmbH