

HITNA SIGURNOSNA OBAVIJEST

**Informacije o sustavu CT skenera za rendgensko snimanje
cijelog tijela SCENARIA View / Supria / Speedia**

**Br.: FCO-CT-22-0002Z
Kontrolni broj: QAC22-014
Vrsta radnje: FSCA
lipanj 2022.**

Poštovani,

U ovom se dokumentu nalaze važne informacije za nastavak sigurne i pravilne upotrebe vašeg medicinskog proizvoda.

Pojedinosti o zahvaćenim uređajima:

Naziv proizvoda: SCENARIA View V1.08/V1.09/V1.09A/V1.09B/V1.09C/V1.0B/V1.0C
Supria / Supria 64 V3.11/V3.22
FCT Speedia / FCT Speedia HD V3.22

Opis problema:

Prijavljeno je da tijekom snimanja dolazi do pogreške 00003050 ili 00003052 ako podaci o pacijentu sadrže specifične riječi. Kada dođe do pogreške, slike se ne rekonstruiraju i izvorni podaci ne prikazuju se na popisu.

Savjet o radnji koju trebaju poduzeti korisnici:

Pripremamo softver s protumjerama.

Ispričavamo se zbog neugodnosti koju vam to može prouzročiti. Dok softver s protumjerama ne bude spreman, pročitajte sljedeće „Napomene o mjerama opreza pri upotrebi” i upotrebljavajte sustav CT skenera.

Slanje ove sigurnosne obavijesti:

Ovu obavijest treba poslati svima onima koji trebaju biti upoznati s ovim problemom unutar vaše organizacije ili u bilo kojoj organizaciji u koju su potencijalno zahvaćeni uređaji poslani.

Geografska rasprostranjenost:

Alžir, Bangladeš, Bolivija, Kambodža, Čad, Kongo, Hrvatska, Dominikanska Republika, Ekvador, Egipat, Njemačka, Gvatemala, Mađarska, Indija, Irak, Izrael, Italija, Kazahstan, Kuvajt, Libija, Litva, Maroko, Mjanmar, Nizozemska, Nepal, Pakistan, Peru, Filipini, Rusija, Senegal, Singapur, Južna Georgia, Južna Koreja, Španjolska, TAJVAN, Togo, Trinidad i Tobago, UAE, Uganda, Ukrajina, Vijetnam

Osoba za kontakt:

U popratnom pismu ovoj „Sigurnosnoj obavijesti” navedena je osoba za kontakt u lokalnoj prodajnoj organizaciji.

Lijep pozdrav,
FUJIFILM Healthcare Corporation

„Napomene o mjerama opreza pri upotrebi”

Javljanje pogreške

Pogreška se javlja tijekom snimanja ako podaci o pacijentu sadrže sljedeće riječi.

- **ready** (npr. ime pacijenta sadrži riječ **ready** kao npr. ****ready****.)
- **status**
- **finished**

Do pogreške dolazi samo ako su gore navedene riječi upisane malim slovima.

Podaci o pacijentu su sljedeći.

ID pacijenta, ime pacijenta, pristupni broj, komentari o pacijentu, komentari o pretrazi, komentari o seriji, liječnik koji je uputio na pretragu, liječnik koji je zatražio pretragu, liječnik koji očitava nalaz, rukovatelj, naziv bolnice, naziv odjela, naziv stanice, zatražena usluga, naziv protokola, kontrastno sredstvo, naziv regije

Upute za rješavanje problema

Pri unosu abecednih znakova u podatke o pacijentu znakove upisujte velikim slovima.

(npr. **ready** > **READY**)

Pored toga, ako značajku „Auto Capital Letter” (Velika slova automatski) postavite na „ON” (Uključeno) u prozoru Preference Settings (Postavke preferencija), ime pacijenta automatski se pretvara u velika slova u prozoru Patient Registration (Registracija pacijenta). Pri upotrebi MWM-a, neke stavke ne mogu se promijeniti u prozoru Patient Registration (Registracija pacijenta) i na primjenjuje se automatska promjena u velika slova. Stoga sljedeće oznake podataka o pacijentu treba registrirati velikim slovima.

- (0008,0050) Pristupni broj
 - (0008,0090) Ime liječnika koji je uputio na pretragu
 - (0010,0010) Ime pacijenta
 - (0010,0020) ID pacijenta
 - (0010,4000) Komentari o pacijentu
 - (0032,1032) Liječnik koji je zatražio pretragu
 - (0032,1033) Tražena usluga
 - (0032,1060) Opis traženog postupka
 - (0032,1070) Zatraženo kontrastno sredstvo
 - (0040,0006) Ime liječnika koji obavlja pretragu
-